

SOLUCIONES PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN

ENVASES FLEXIBLES DE POLIPROPILENO

SISTEMA CERRADO DE ADMINISTRACION I.V.


GUIA PARA EL CORRECTO USO Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

PASO 1




RETIRE EL COBERTOR PLASTICO PROTECTOR DEL CAP DE ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TIRANDO HACIA ARRIBA Y LUEGO ROTANDO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LOGRAR EL CORTE. DESCARTAR EL COBERTOR APROPIADAMENTE.

PASO 2

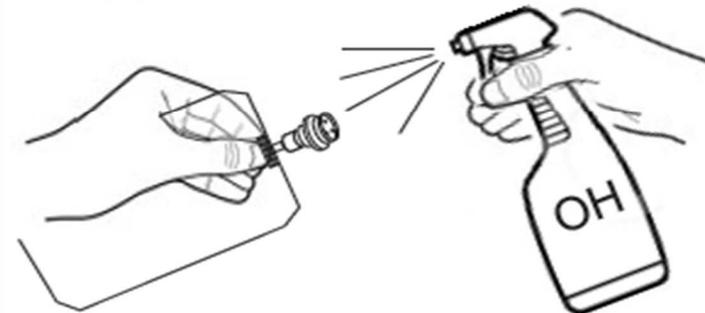

VAPORICE EL ELASTOMERO DE GOMA DE PERFUSION/ADMINISTRACION CON LA SOLUCION DESINFECTANTE SELECCIONADA. CAMBIE DE AGUJA EN LA JERINGA CONTENIENDO EL MEDICAMENTO.


PASO 3

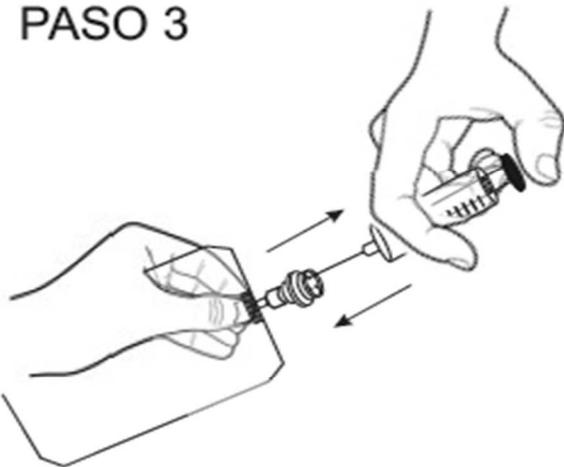

PERFUNDA A TRAVES DE UNOS DE LOS PUNTOS DE ADMINISTRACION DEL TAPON CON LA AGUJA DE LA JERINGA CONTENIENDO EL MEDICAMENTO. INGRESADA LA TOTALIDAD RETIRE LA MISMA Y DESCARTE ADECUADAMENTE. (NOTE QUE EL TAPON TIENE 3 PUNTOS CLARAMENTE DEMARCADOS)


INVIERTA EL ENVASE ROTANDOLO COMO MINIMO 2-3 VECES A 180° PARA MEZCLAR EL MEDICAMENTO.

PASO 4

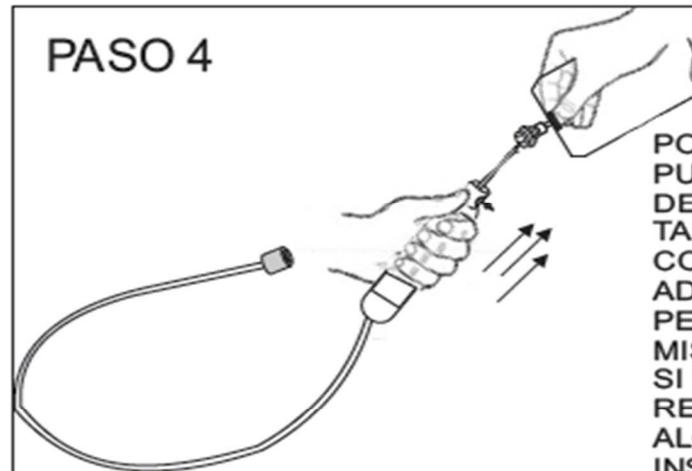

POR OTRO DE LOS PUERTOS DEMARCADOS EN EL TAPON DE GOMA COLOQUE LA GUIA DE ADMINISTRACION PERFORANDO EL MISMO. SI USTED DEBE RETIRAR LA GUIA POR ALGUN MOTIVO RE INSERTE LA MISMA POR EL PUNTO USADO ANTERIORMENTE.

PASO 5

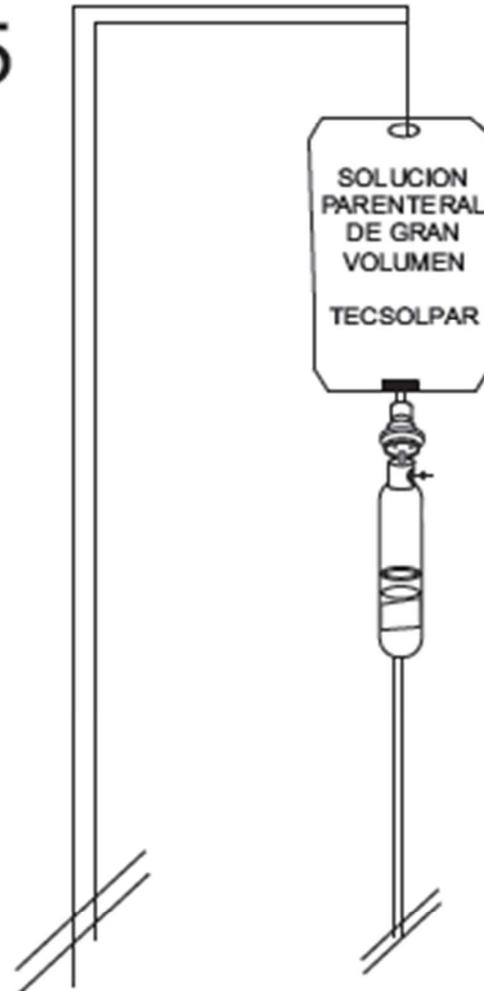

ADMINISTRE AL PACIENTE VIA I.V.
COLGANDO EL ENVASE DE SU ASA
DE SUSTENTACION.

REGULE EL GOTEO MANUALMENTE
O ADMINISTRANDO POR BOMBA
SEGUN INDICACION MEDICA